

Breipatroon kleine deelprothese (banaantje)

Benodigdheden:

- 4 naalden zonder knop (sokkennaaldjes), 3,5 mm (of aangepast)
- Zachte (goedgekeurde) katoen
- Vulling 100% polyester, fiberfill
- Maasnaald met stompe punt
- Markeerder (of anders gekleurd draadje om begin te markeren)




Afkortingen

M1= meerderen door een steek te breien en niet af te halen, maar steek de rechternaald nogmaals in de achterkant van dezelfde steek, brei de steek en laat afglijden.

M1r= meerderen door de draad tussen de steken met de linkernaald op te nemen en met de rechternaald achterin te steken en recht te breien, je ziet een / strak onder je steek. Zo voorkom je gaatjes.

B2rs= brei 2 steken recht samen.

De kleine deelprothese kan in de cup gelegd worden op de plaats waar nodig. Met meer of minder vulling en een beetje kneden kan het in de cup gelegd worden op de plaats waar het nodig is.

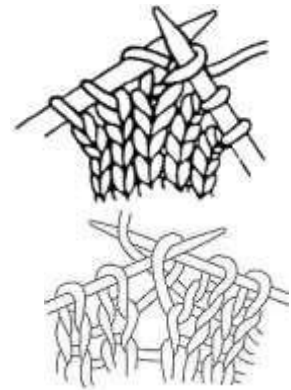

Patroon

Er wordt alleen recht, in de rondte gebreid

- Zet 3 steken op en brei (Icord, 2 pennen)
- Brei uit elke steek 2 steken.

Zet 2 steken op elke naald en start rond breien.

Brei re tot nog 1 steek op naald staat, m1r, 1 re (herhaal nog 2 x met de andere naalden.)

Bij 3 x 4 steken, start meerderen door alleen in eerste naald re te breien tot aan laatste steek, m1r, 1 st r en de andere 2 naalden steeds recht breien. Herhaal tot het aantal gewenste steken.

Een markeerder in de eerste naald is handig om te zien waar nieuwe ronde begint.

Verdeel de steken af en toe beter over de 3 naaldjes voor prettiger breien.

Brei door tot gewenste lengte (zie tabel).

Minder de steken door alleen in het eerste naaldje de laatste 2 steken samen te breien. (b2rs.)

Brei tot er nog 3 X 4 steken over zijn (voor de laatste mindering een knoopje in de draad leggen en dicht tegen de steek aantrekken, de laatste twee steken samenbreien en weer een knoopje leggen) Knip voor de laatste mindering de draad op 30 cm lengte af en rijg deze na het breien van de laatste mindering door de steken.

De deelprothese vullen en het vulgatje openhouden.

De gebruikster kan de inhoud naar wens aanpassen, de draad aantrekken en erin stoppen of afhechten. Voor de maten zie tabel volgende bladzijde.

Heeft u vragen of hulp nodig, neem dan even contact met ons op met een van de bestelpunten of via tel ons landelijk tel. nr 0627654441 of mail naar: kkdebreiprothese@gmail.com
<https://knittedknockersdebreiprothese.nl/contact/>



Knitted knockers de breiprothese

Breipatroon kleine deelprothese (banaantje). Maattabellen

Maat tabel

Nummer zie tabel onder	Maat in cm	Opzetten	Meerderen tot..... steken	Breien tot..... cm	Minderen tot	Gewicht breiwerk ca. gram	Vulling ca. gram	
0	11	3 st.	21	8	3x5	4	4	
1	12		24	8		5	4	
2	13		24	9		5	5	
3	14		24	9,5		6	5	
4	15		27	10		7	5	
5	16		27	11		8	6	
6	17		27	12		9	6	
7	18		30	12		10	6	
8	19		30	13		11	6	
9	20		30	14		12	7	
10	21		30	15		13	7	
11	22		30	15,5		14	7	
12	23		33	16		15	8	
13	24		33	17		16	8	
14	25		33	18		17	8	
	CUP	CUP	CUP	CUP	CUP	CUP	CUP	CUP
nummer	band	band	band	band	band	band	band	band
maat	70	75	80	85	90	95	100	105
0	A							
1	B	A						
2	C	B	A					
3	D	C	B	A				
4	E	D	C	B	A			
5	F	E	D	C	B	A		
6		F	E	D	C	B	A	
7			F	E	D	C	B	A
8				F	E	D	C	B
9					F	E	D	C
10					G/H	F/G/H	E/F/G/H	D/E/F/G/H